

Vision For All's sorteringsinstruktion

För att underlätta arbetet som läggs ner på insamling och förberedelse av glasögon har vi följande instruktioner. Har du inte själv möjlighet att genomföra alla steg ber vi dig att följa de steg som passar för dig innan du skickar glasögon vidare till Vision For All.

Sortera

Släng repiga och trasiga glasögon. Var hård. Tokigt att skicka glasögon som inte kan användas. **Släng alla fodral (de tar för mycket plats och vikt i bagaget vid våra resor).**

Tvätta

1. Blötlägg i ljummet vatten (ej hett) med diskmedel. 2. "Rör runt" i baljan och låt stå några minuter (Vid särskilt smutsiga glasögon, rengör med tandborste) 3. Flytta över till diskbalja med ljummet vatten utan diskmedel 4. Ta upp och låt torka

Torka och paketera

Paketera i bananlådor, för att de enkelt ska kunna staplas och enkelt kunna hanteras i vårt lager. Lägg glasögonen i rader med tidningspapper emellan. Märk upp lådan med aktuell status genom att bifoga lapp med utförda åtgärder ikryssade. Se lapp nedan. **Lägg INTE i omätta glasögon i plastpåsar!**

Mätning För er som kan och har möjlighet så är vi vara tacksamma om ni hinner med att mäta upp glasögonen enligt följande:

Skillnaden mellan höger och vänster glas får vara max 0,75 D och **cylinderstyrka får vara max 0,50 D.**

Single-vision styrkor skrivs direkt på påsen med **permanent** spritpenna. Blått/svart för plusglas och Rött för minusglas.

OD = Oculus Dexter = Höger öga OS = Oculus Sinister = Vänster öga OA = Oculi Ambo = Båda ögonen ADD = Addition, lästillägget på bi- eller multifokala glasögon. Se nedan. Ex: Single Vision, samma styrka hö/vä: **OA: +3,75**

Single Vision, olika styrka: **OD: -1,25 OS: -1,00 - 0,50 x 90°**

Bi- eller multifokala: **OD: -4,25 - 0,25x 10° OS: -3,75 ADD: +2,50**

För **bi- och multifokala skrivs styrkan på en märkeslapp**, som kan skrivas ut från hemsidan, och som **läggs synligt i påsen** tillsammans med glasögonen.

https://www.visionforall.org/files/ugd/a1d149_b95c57840b384ea7a50b69af765cd163.pdf

Använd påsar i storleken 9x19 cm ungefär. Går att beställa från Paul Hall AB: 036-34 11 00

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni kunde fylla i nedanstående lapp och bifoga den med lådan/lådorna. Detta underlättar vårt sorteringsarbete oerhört mycket.

Tack på förhand,
Vision For All

Det här är statusen för vår låda:

Osorterat ☐

Sorterat ☐

Ej tvättat ☐

Sorterat & tvättat ☐

Sorterat bort ej användbara styrkor ☐

Uppmätta & klara för nya ägare ☐

Vi som skickade lådan är: